



D2 et D4 Container de Déchets Ponctuels

FERMETURE APPROPRIÉE DU COUVERCLE

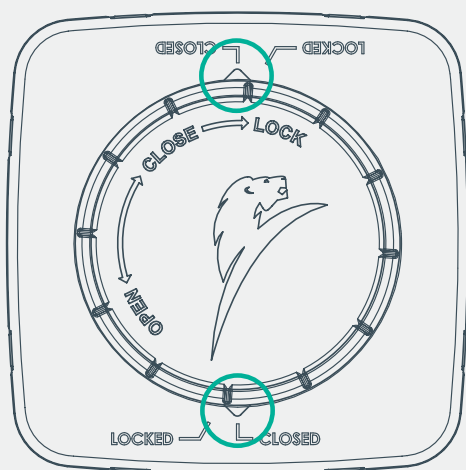

POSITION FERMÉE

En position fermée, le couvercle est scellé et étanche. Le capuchon ne doit pas être lâche à ce stade ; s'il semble lâche, tournez-le davantage.

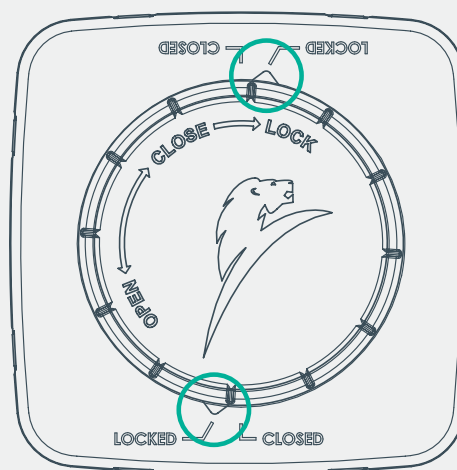

POSITION VERROUILLÉE

Dans la position verrouillée, le couvercle est scellé et les objets pointus sont sécurisés pour le transport. Le capuchon doit être tourné au maximum.

Les flèches moulées sur le capuchon doivent s'aligner avec les marquages sur le couvercle du conteneur pour indiquer la position fermée ou verrouillée.

