

Comment se débarrasser de Objets pointus utilisés en toute sécurité

Qu'est-ce que **acceptable** déchets perforants?

Acceptable

- ✓ **Aiguilles usagées (y compris les aiguilles pour stylo)** - Aiguilles utilisées pour injecter des médicaments sous la peau.
- ✓ **Syringes usagées** - Dispositifs utilisés pour injecter des médicaments dans le corps ou retirer des fluides du corps.
- ✓ **Lanceurs ou dispositifs de piqûre au doigt usagés** - Un instrument avec une lame courte à deux bords utilisé pour obtenir des gouttes de sang (généralement du doigt).
- ✓ **Injecteurs automatiques à dose unique usagés** - (Comme un stylo d'épinéphrine) Avec une aiguille incluse dans le dispositif. (Instruments avec des médicaments pré-remplis conçus pour être auto-administrés).
- ✓ **Aiguilles de sets de perfusion usagées ou aiguilles de connexion** - Aiguilles utilisées avec des systèmes de tubulure pour administrer des médicaments/fluide au corps ou en extraire.

Les blessures par piqûre d'aiguille provenant de déchets perforants usagés peuvent entraîner des infections ou des maladies. Si vous êtes blessé, consultez immédiatement un médecin.

Non Acceptable

- ✗ Médicaments et flacons de pilules.
- ✗ ÉPI (gants, blouses, masques).
- ✗ Ordures, recyclage et emballages.
- ✗ Bandes adhésives et mouchoirs.
- ✗ Injecteur automatique à doses multiples (comme un stylo à insuline) sans aiguille.

Les objets perforants doivent uniquement être placés dans un conteneur pour objets perforants sécurisé et approuvé, et NON dans les ordures ménagères.

NE PAS ne mettez pas les objets perforants dans des bouteilles ou des jugs en plastique.

NE PAS Ne mettez pas les objets perforants dans les sacs poubelle ou de recyclage.

NE PAS jeter les objets perforants dans les toilettes.


NE PAS essayer de retirer, plier ou recouvrir les aiguilles usagées.

NE PAS mettre autre chose que des objets perforants dans un conteneur pour objets perforants.

Veillez éliminer vos objets perforants de manière sécurisée.

Voici comment:

- 1 Prenez un conteneur pour objets tranchants à votre pharmacie communautaire

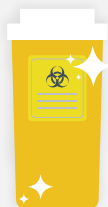

- 2 Placez vos objets tranchants usagés dans le conteneur.



- 3 Lorsque le conteneur est plein, retournez le conteneur scellé à votre pharmacie communautaire.

