


# Secure a Drug

## Fermeture correcte du couvercle




**SECURE**  
a DRUG

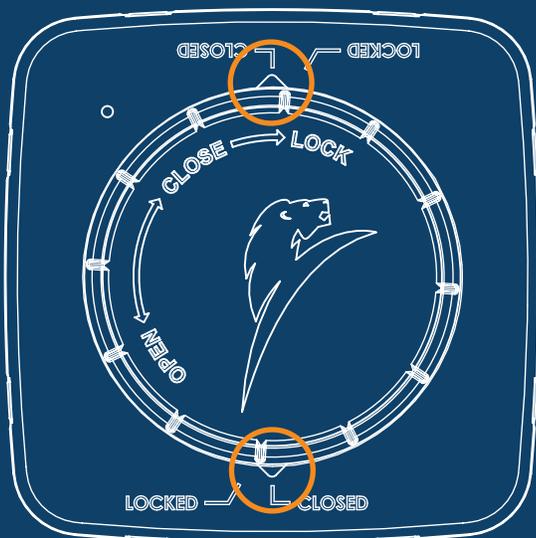

### POSITION FERMÉE

En position fermée, le couvercle est scellé et étanche à l'eau.

Le bouchon ne doit pas sembler lâche à ce stade. Si le bouchon semble lâche, vissez-le davantage.

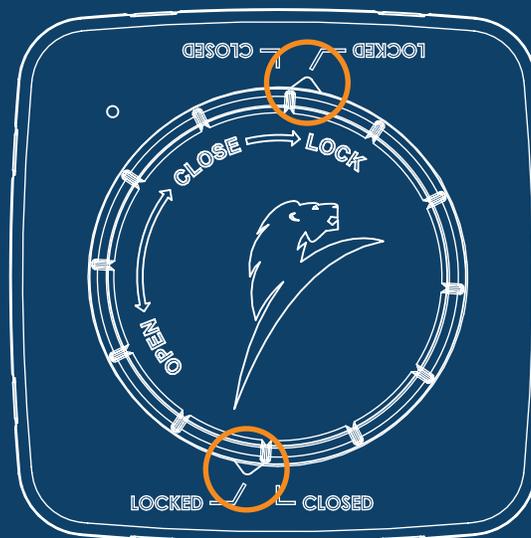

### POSITION VERROUILLÉE

En position verrouillée, le couvercle est scellé, étanche à l'eau et ne s'ouvrira pas pendant le transport. Le bouchon doit être vissé jusqu'à la position la plus éloignée pour verrouiller le contenant de manière sécurisée.

Les flèches moulées sur le bouchon doivent s'aligner avec les marquages sur le couvercle du contenant pour indiquer la position fermée ou verrouillée.



866 994 5205



WWW.SECUREADRUG.CA